



SHIFT\_the way you move

**cube**

ライフケアビークル



**Enchanté**

助手席スライドアップシート



## Chair Cab

スロープタイプ

（ベンチシートタイプ/サイドシートタイプ）

NEW



ベンチシート  
タイプ

2名 + 車いす1名  
または 5名乗り

サイドシート  
タイプ

3名 + 車いす1名  
または 3名乗り





## チエアキャブ

コンパクトなボディに、車いすのまま乗り降りできます。

■使いやすい新開発スロープと乗降アシスト装置を採用しました。

### 設定グレード

ベンチシートタイプ	15S	2WD	エクストロニックCVT
サイドシートタイプ	15S		

### ベンチシートタイプ (折りたたみ機能付)

定員 車いす1名+2名 または 5名



#### こんな方におすすめ！

- いざという時に、車いすの方を乗車させたい方。
- 状況に応じて、1台2役の使い方ができます。

#### 5ナンバー

Photo: チエアキャブベンチシートタイプ。15S。ボディカラーはホワイトパール(3P)(#QX1・特別塗装色)。内装色はグラファイト(G)。オプション装着車。チエアキャブ専用車いすは参考例。



#### 室内レイアウト



<車いす乗車時>



<車いす非乗車時>



リヤシート折りたたみ時  
(車いす乗車時)



リヤシート使用時  
(車いす非乗車時)

\*イラストおよび写真の車いす用手すりはオーテック扱いオプションです。

#### NEW

### サイドシートタイプ 車いすのとなりに座れるので 目が届いて安心です。

定員 車いす1名+3名 または 3名



#### こんな方におすすめ！

- 車いすの方が乗る機会が多い方。
- 介助者が車いすの方のとなりに座りたいという方。

#### 8ナンバー

Photo: チエアキャブ サイドシートタイプ。15S。ボディカラーはパシフィックブルー(PM)(#B51)。内装色はグラファイト(G)。チエアキャブ専用車いすは参考例。



#### 室内レイアウト



<車いす乗車時>



<車いす非乗車時>





## 快適にお使いいただくために

### 標準装備 (ベンチシート・サイドシートタイプ共通)



#### Point

シートアレンジはとっても簡単。すばやく5名乗車と車いす乗車のレイアウトが可能です。



#### Point

車いすの方に目が行き届きやすいサイドシートには、リクライニング機能も備わり、移動中も快適にすごせます。



#### ■ ワイヤレスリモコン

速度可変機能を追加しました。



**NEW**

とっても便利!

車いすの乗降をもっと簡単に。そんな声にお応えし、車いすの乗降・固定はワイヤレスリモコン1つで可能です。

①車いすの固定ができます。

②乗降アシスト装置のベルトを手動で出し入れする時に使用します。

③通常よりもすばやく乗降したい時に最適です。  
(ベルトを早く巻き取ったり、引き出したりができます。)

④通常の速度で乗降ができます。

#### ■ 乗降アシスト装置

乗降時の介助者の負担を軽減します。



力の弱い介助者でも安心の乗降アシスト機能を採用しました。乗車時は後退防止機能も備わり安心です。

#### ■ スライド式スロープ

**NEW**

#### ■ 車いす用3点式シートベルト

**NEW**

車いすの方にもやさしい



新聞発のスライド式の3分割スロープを採用しました。すばやくスロープの開閉ができます。

肩と腰のベルトは別々にとめることができます。(モデルの身長は157cmです。)

#### ■ 電動格納式カラードドアミラー



#### ■ 専用リヤデザイン



車いすの乗降をスムーズにするため、専用デザインとなります。

## ■ 乗り込み方法

\*写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。ベンチシートタイプとサイドシートタイプとともに操作方法は同じです。お乗降の際は必ず介助者が車いすを後から支えてください。

スロープ耐荷重 200kg

## STEP 1

## 乗り込みの準備




バックドアを開け、スロープ左右のロックを解除します。  
(写真は左側)



スロープのハンドルを持ち、手前に倒しながら引き出します。  
スロープはオレンジ色のマークが合うまで、完全に引き出して使用してください。




バックドアにバックドアストッパーを確実にかけてください。

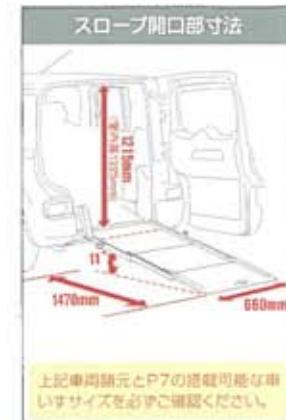

上記両開き元とP7の搭載可能な車いすサイズをおさご確認ください。

## STEP 2


## 車いすを車内に乗せる

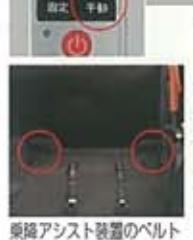

ワイヤレスリモコンの電源を入れ、「ベルト手動」ボタンを押し(ランプが点灯します)、乗降アシスト装置のベルトを引き出します。ベルトらくらく機能付ですので、歩く速さでスムーズに引き出せます。



フックを車いす前側キャスター上部のフレーム左右2ヶ所に装着します。  
**Point** しっかり前側キャスター上部にかけましょう

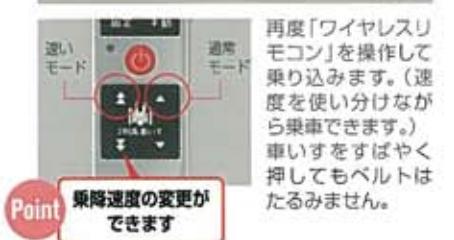

再度「ワイヤレスリモコン」を操作して乗り込みます。(速度を使い分けながら乗車できます) 車いすをすばやく押してもベルトはたるみません。  
**Point** フラットフロアで乗り込みやすい  
**Point** 乗降速度の変更ができます



車いすは主軸の設置面がオレンジ色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。

## STEP 3

## 車いすを車内に固定する



後側の固定ベルトを車いすのフレームに装着します。



ワイヤレスリモコンの「車いす固定」または車両側の乗降アシスト装置の操作スイッチを押し、車いすを固定します。車いすがしっかりと固定されたことを確認し、車いすのブレーキをかけ、シートベルトを装着したら完了です。



シートベルト着用時の注意  
シートベルトは車いすの座面横またはアームレスト下の胸骨を通じて、腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。  
①をとめてから②をかけます。  
シートベルトアンカーの位置がそれぞれ異なります。  
肩と腰のベルトは、それぞれ装着してください。



もっと快適にお使いいただくために — さまざまなオプションをご用意しております。

### チアキャブ専用メーカーオプション

\*セットオプションとなります。単独での選択はできません。

毎日の使い勝手を考えてオプションはパッケージングしました。

#### ■ ブライバシーガラス



車両は三駆車両とは異なります  
紫外線を約90%カットするとともに、断熱効果にも優れています。

#### ■ インテリジェントキー&プッシュエンジンスター



ポケットからキーを取り出さなくともスイッチをワンプッシュするだけでエンジンが始動できます。

#### ■ インテリジェントエアコンシステム




車両はプラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmacusterはシャープ株式会社の商標です。  
車両は三駆車両とは異なります

室内の空気を常に新鮮に保つ「プラズマクラスターイオンフルオートエアコン」や「排出ガス感知式内外気自動切換機構」、「高性能フィルター」に加え、これらを同時に作動させる「ワンタッチクリーンスイッチ」を採用。ボタンひとつで簡単に室内の空気をクリーンにできます。

### チアキャブのご検討にあたって ご留意いただきたい点

#### 乗車可能な車いすの目安

車いすの乗車位置はベンチシートタイプ、サイドシートタイプ共通となり、乗車可能な車いすのサイズも同一です。

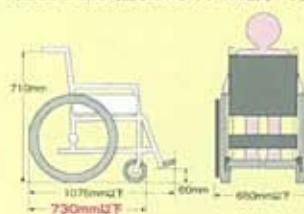


- 安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- スロープの出し入れの際には、車両後方および車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性があります。)
- スロープで乗り降りされる際には、必ず車いすの方の後方に介助の方がついてください。(車いすが転倒する危険性があります。)
- バックドアの開口部の高さは1215mmです。頭をぶつけないで通過できるかご確認ください。
- 室内の高さは1225mmです。頭をぶつけないかご確認ください。(座面の高さが400mm以下の車いすをお勧めします。)
- スロープの耐荷重は200kg(車いす+車いす搭乗者+介助者)までです。
- 専用リヤシートについて  
(ベンチシートタイプ)
  - ・160mmの前後シートスライドや、左右独立のシートリクライニングができます。
  - ・オーテック扱いオプションの車いす用手すり装着車は、リクライニングが制限されます。
  - ・リヤシートのダブルフォールディング時は、フロントシートのシートスライド間が座面より4cm(4ノッチ)、またその位置でのリクライニングはシートバックの座面より7.5°(4ノッチ)に制限されます。
- ・リヤシートにシートスライド機能はありません。

### ■ 二面図 (単位:mm) \*各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。

#### ■ アンシャンテ

##### 助手席スライドアップシート

###### ●昇降時寸法

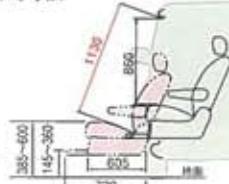

###### ●回転時寸法



イラストは15X

### ■ 主要諸元

	アンシャンテ		チアキャブ	
	助手席スライドアップシート		ベンチシートタイプ	サイドシートタイプ
2WD	HR15DE	e-4WD	2WD	HR15DE
15X	Vセレクション	15X FOUR	15S	
ニッサンDBA-Z12	ニッサンDBA-NZ12	Vセレクション	ニッサンDBA-Z12	
寸法				
全長×全幅×全高 mm	3890×1695×1650	3890×1695×1650 (1660) (1660)	3890×1695×1660	3890×1695×1650
室内寸法(当時)×横幅×高 mm	1950×1395×1275	1950×1395×1275 (1725)	1950×1395×1275	1950×1395×1275 (1725)
前・後・左・右寸法 mm	1240	1330	1270	1250
車内座面高 mm	5	5 [車いす乗車時] 4 [車いす乗車時]	5 [車いす乗車時] 3 [車いす乗車時] 4	
車両総重量 kg	1515	1605	1545	1470
使用燃料・タンク容量 L	無給レギュラーガソリン・45	無給レギュラーガソリン・45	無給レギュラーガソリン・45	
その他	スライドアップシート具備前方 100kg	スライドアップシート具備前方 100kg	スロープ荷物室 200kg	



注: ( ) 内はスタイリッシュガラスルーフ装着車。

※車いす非乗車時は3名乗車となります。

\*平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)認定。ただし、持込み登録のため減税措置は適用されません。

#### ■ チアキャブ

##### ベンチシートタイプ

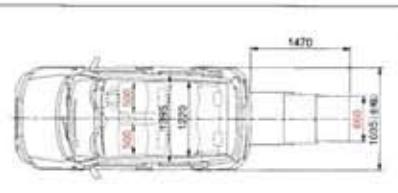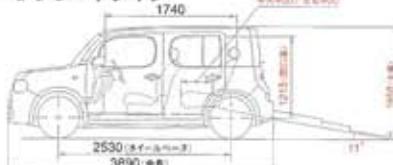

### オーテック扱いオプション

#### ■ 助手席スライドアップシート (サイドシートタイプに設定)



写真はアンシャンテ。チアキャブの内装色はグラファイト(G)のみになります。

#### ■ 車いす用手すり (ベンチシートタイプに設定)



写真はアンシャンテ。車いす用手すり(右側)が標準装備となります。左側の設定はありません。

### オーテック扱いディーラーオプション

#### ■ 専用車いす

安全性、乗り心地、シートベルトの装着性を向上した車いすです。ヘッドレストを取り外せば、折りたたむことも可能です。



#### ■ 専用フロアカーペット

標準車用フロアカーペットは形状が合わないので、装着をきたすおそれがあります。必ず専用フロアカーペットをご使用ください。



#### ■ 車いすスペース専用フロアマット



ビニールレザーティーで  
フロアの汚れを防止  
します。



写真はアンシャンテ。チアキャブの内装色はグラファイト(G)のみになります。

